



# Provtagningsinstruktioner

**Allergenius® Dog Allergentest.** Världens första individuella allergentest hjälper dig att mäta de allergener som just din hund utsöndrar – och i vilken mängd.



# Bra att tänka på innan du gör testet



Badning och tvättning påverkar mängden mjäll och allergen i pälsen tillfälligt. Därför rekommenderar vi att hunden inte badar fem dagar före provtagningen.

För att hunden inte ska röra sig under provtagningen – välj ett tillfälle när ni har en lugn stund tillsammans. Det är en fördel om ni är två personer som hjälps åt. En som håller i hunden och en som tar proverna.

## Gör testet i denna ordning:

1. Registrera dig på vår hemsida och skriv in numret under streckkoden som finns på varje provrör.
2. Läs igenom instruktionerna. Var noga med att följa instruktionerna för att få ett tillförlitligt svar.
3. Gör testet



1. Registrera testerna på [allergenius.se](http://allergenius.se), "Mina sidor"



2. Läs igenom instruktionerna noggrant



3. Testa din hund enligt instruktionerna



4. Skicka in proverna i bifogat svarskuvert



5. Läs e-post som kommer efter 2-4 veckor




6. Se resultatet genom att logga in på "Mina sidor"

### Provtagningskit:

- 2 st provrör med borstar inuti
- 1 st provtagningsmall
- 1 st salivinsamlare
- Instruktionsfolder
- Frankerat returkuvert

## Så registrerar du dig:


1. Gå in på [www.allergenius.se](http://www.allergenius.se) och klicka på "Mina sidor"
2. Logga in på ditt användarkonto. Har du inget konto så skaffar du ett genom att klicka på fliken "Skapa nytt konto" och följ instruktionerna.
3. Registrera de 2 provrören + salivinsamlaren genom att skriva in numren från respektive rörs streckkod (nacke, ljumske och saliv). Tänk på att varje rör har ett individuellt nummer som används för att vi ska kunna koppla ihop varje prov med rätt hund och provtagningstillfälle.
4. **OBS! Skriv ned och spara numren på provrören som säkerhetsåtgärd tills du fått ditt testsvar.**
5. Ange hundens namn. Det använder du senare för att utläsa dina testsvar.
6. Svara på frågorna i enkäten som visas i flödet. Det tar bara ca 15 minuter. Enkäten är frivillig men vi är mycket tacksamma om du vill vara med och bidra till forskningen. Registrerar du prover ifrån en valp svarar du endast på de obligatoriska frågorna.
7. Glöm inte att spara innan du loggar ut från "Mina sidor".

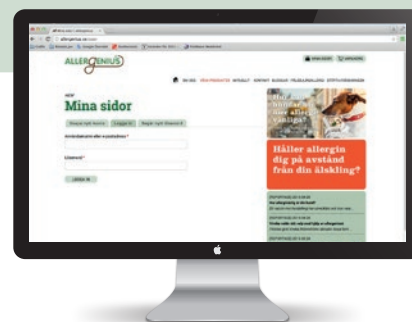

# Provtagning – päls

Vid provtagningen fastnar mjäll från hud och päls på provtagningsborsten. Mjället är osynligt, därför ser borsten oanvänd ut även efter borstningen. Det kan fastna en del pälsår i borsten, men det påverkar inte provresultatet.

Du ska ta prov från nacke samt ljumske med en borste för varje ställe. Använd provtagningsmallen för att ta proverna på en begränsad del av pälsen.

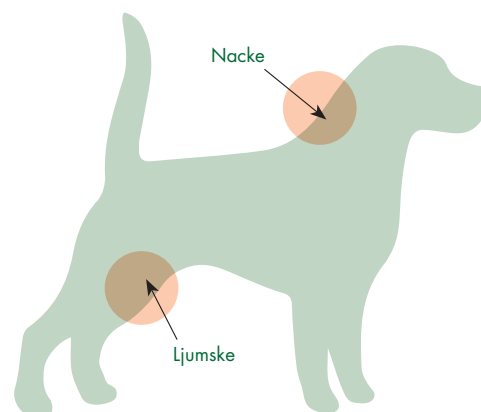

## Gör så här:

1. Skruva av locket från provröret och ta ut borsten. Använd en tändsticka eller liknande om det är svårt att få ut borsten. Den sitter lite hårt i röret (nödvändigt för laboratorieprocessen). Spara både röret och locket. Se till att märkningen på röret stämmer överens med respektive provtagningsplats (nacke eller ljumske).
2. Lägg provtagningsmallen på det pälsområde som du ska borsta. För igenom all päls som syns i den rektangulära provtagningsytan.
3. Borsta längs med pälsstråna - från hårrötterna och huden - upp till toppen på pälsen. Borsta igenom alla pälslager i olika riktningar och se till att snurra/rotera borsten hela tiden. Gör 30 borsttag (1 tag per sekund i 30 sekunder). **Viktigt: Se till att hela borsten kommer i kontakt med all päls i rutan på provtagningsmallen.**
4. Lägg borsten i provröret och skruva på locket.
5. Upprepa momenten ovan på nästa provtagningsplats.



Borstning av korthårig päls



Borstning av långhårig päls



## Höga allergennivåer? Då har vi en lösning.

Om du skulle få höga provsvar så vill vi påminna dig om att du kan tvätta din hund med Allergenius® Dog specialschampo. Det hjälper din hund att bli mer allergivänlig. Schampot finns i webshoppen: [www.allergenius.se](http://www.allergenius.se)

## Tack

För att du hjälper forskningen framåt!



# Provtagning – saliv

Vid provtagningen suggs saliv in i skumgummitopsen. Det spelar ingen roll var i hundens mun du tar provet. Men det är viktigt att topsen blir ordentligt mättad. Om hunden normalt har lite saliv, ta provet när hunden har så mycket saliv som möjligt.

1



2



3



5



6



7



## Gör så här:

1. Skruva isär salivprovtagaren på mitten. Memorera hur svabben ligger. Den ska ligga åt andra hållet efter provtagningen.
2. Ta ur svabben och spara provröret. För svabben fram och tillbaka under överläpp och runt i munnen på hunden under minst 1 minut. **Det är viktigt att svabben blir ordentligt blöt och mättad med saliv.**
3. Lägg tillbaka svabben i tjocka delen av röret, med svabben vänd mot det längre smala röret (med ett vidhängande lock).
4. Ta fram det andra (tomma) tjocka röret och skruva loss det lilla locket på toppen.
5. Trä detta rör över salivprovtagarpinnen och skruva ihop rörets två tjocka delar.
6. Ta tag i änden på salivprovtagaren och dra den uppåt tills du ser en markering. Bryt av pinnen vid markeringen och släng biten du just brutit av.
7. Sätt på det lilla locket på det tjocka röret där pinnen stack upp. Skruva åt korken ordentligt.
8. Skicka in: placera de tre proverna i kuvertet. Förslut returkuvertet och posta.

## Så här får du svar:

Dina prover är klara efter 2-4 veckor och då får du ett mejl från oss. Gå in på vår hemsida och logga in på "Mina sidor" för att hitta dina provsvar. Då får du veta din hunds allergenprofil inom tre av de sex allergen som finns.

## Endast ett test för en komplett profil

Senare kommer du även att få svar på ytterligare två allergen så fort dessa är utvecklade. Du behöver alltså bara göra ett enda test för att få en fullständig allergenprofil.

## Dina provsvar sparas på ditt konto

Dina provsvar kommer att ligga kvar på ditt användarkonto. Du kan alltså logga in när som helst och titta på alla tester du tidigare gjort. Allt du behöver är ditt användarnamn och lösenord.